

GEBRAUCHSANWEISUNG

SWASH[®] BATHING GLOVES 6er-Packung

Produkt-Nummer: Ao4o7o-6 (UDI-DI: o8717127937196)


Benutzer: Professionelle Anwender oder Gesundheitsdienstleister

Verwendungszweck:

Swash[®] Bathing Gloves sind für die Ganzkörperwäsche inkontinenter und/oder bettlägeriger Patienten als Maßnahme zur Infektionsprävention vorgesehen.

Hilfsmittel:

- Einweghandschuhe
- Abfalleimer
- Papiertücher (falls erforderlich)
- Inkontinenzprodukte (falls erforderlich)
- Saubere Kleidung und/oder Bettwäsche (falls erforderlich)
- Mikrowelle (falls erforderlich)

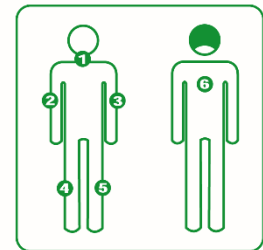

Gebrauchsanweisung:

Benutzen Sie für jeden Körperteil einen Waschhandschuh (siehe Piktogramm). Falls gewünscht, kann die Packung in der Mikrowelle erwärmt werden. Prüfen Sie die Temperatur vor dem Gebrauch. Jede Packung darf nur für eine Person verwendet werden. Eine detaillierte Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben.

Detaillierte Vorgehensweise:

Swash[®]-Waschhandschuhe können zentral auf der Station oder neben dem Bett des Pflegebedürftigen gelagert und sowohl erwärmt als auch bei Raumtemperatur verwendet werden. Je nach Mobilität des Pflegebedürftigen ist auch eine andere Reihenfolge möglich, vorausgesetzt, jeder Körperteil (siehe Piktogramm oben) wird mit einem eigenen Waschhandschuh gewaschen. Ein Abtrocknen ist nicht erforderlich. Die Haut trocknet von selbst durch die Verdunstung der Lotion. Falls erforderlich, trocknen Sie die Hautfalten durch Abtupfen mit einem Papiertuch.

- 1 Erwärmen Sie die Swash[®] Bathing Gloves auf die gewünschte Temperatur. Die empfohlene Temperatur erreichen Sie, indem Sie die Packung bei maximal 800 Watt für 15 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen.
- 2 Erklären Sie der pflegebedürftigen Person, was Sie vorhaben und reden Sie während des gesamten Waschvorgangs mit ihm/ihr.
- 3 Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie beginnen und ziehen Sie sich die Einweghandschuhe an.
- 4 Bringen Sie den Pflegebedürftigen in Rückenlage und legen Sie ein Kissen unter seinen/ihren Kopf. Lassen Sie den Pflegebedürftigen die Oberbekleidung ausziehen. Helfen Sie dem Pflegebedürftigen bei Bedarf. Berücksichtigen Sie die Privatsphäre des Pflegebedürftigen.
- 5 Öffnen Sie die Packung mit den Swash[®] Bathing Gloves und entnehmen einen Waschhandschuh. Prüfen Sie die Temperatur des Waschhandschuhs. Denken Sie daran, dass die Einweghandschuhe Ihre Hitzeempfindlichkeit verringern.
- 6 **Waschhandschuh 1:** Legen Sie den Waschhandschuh auf das Handgelenk oder den Handrücken des Patienten. Fragen Sie ihn/sie, ob die Temperatur für ihn/sie angenehm ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie warten, bis der Waschhandschuh eine für den Patienten angenehme Temperatur erreicht hat. Verwenden Sie beide Seiten des Waschhandschuhs, um Gesicht, Nacken und Brust zu waschen. Da sich die Waschlotion verflüchtigt, ist ein Abtrocknen nicht mehr notwendig. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
- 7 **Waschhandschuh 2:** Waschen Sie die Hand, den Arm und die Achselhöhle, die sich an Ihrer Seite befinden. Beginnen Sie am Handgelenk und waschen Sie die Armoberseite mit kreisenden

- Bewegungen bis zur Achselhöhle. Kehren Sie den Waschhandschuh um, waschen Sie die Armunterseite und beenden dies bei der Hand. Achtung: Verwenden Sie beide Seiten des Waschhandschuhs. Da sich die Waschlotion verflüchtigt, ist ein Abtrocknen nicht mehr notwendig. Werfen Sie nach dem Waschen den Waschhandschuh weg.
- 8 **Waschhandschuh 3:** Gehen Sie zur anderen Seite des Bettes und waschen Sie die Hand, den Arm und die Achselhöhle, die sich jetzt an Ihrer Seite befinden. Beginnen Sie am Handgelenk und waschen Sie die Armoberseite mit kreisenden Bewegungen bis zur Achselhöhle. Kehren Sie den Waschhandschuh um, waschen Sie die Armunterseite und beenden dies bei der Hand. Achtung: Verwenden Sie beide Seiten des Waschhandschuhs. Da sich die Waschlotion verflüchtigt, ist ein Abtrocknen nicht mehr notwendig. Werfen Sie nach dem Waschen den Waschhandschuh weg.
 - 9 **Waschhandschuh 4:** Waschen Sie mit beiden Seiten des Waschhandschuhs das Bein, das Ihnen am nächsten ist, vom Knöchel bis zur Hüfte und dann die Füße. Da sich die Waschlotion verflüchtigt, ist ein Abtrocknen nicht mehr notwendig. Trocknen Sie ggf. die Hautfalten durch Abtupfen mit einem Papiertuch. Werfen Sie nach dem Waschen den Waschhandschuh weg.
 - 10 **Waschhandschuh 5:** Waschen Sie mit beiden Seiten des Waschhandschuhs das andere Bein vom Knöchel bis zur Hüfte und dann die Füße. Da sich die Waschlotion verflüchtigt, ist ein Abtrocknen nicht mehr notwendig. Trocknen Sie ggf. die Hautfalten durch Abtupfen mit einem Papiertuch. Werfen Sie nach dem Waschen den Waschhandschuh weg.
 - 11 **Waschhandschuh 6:** Bitten Sie den Patienten, sich auf die Seite zu drehen und bieten Sie ggf. Unterstützung an. Waschen Sie den Rücken des Patienten mit beiden Seiten des Waschhandschuhs. Da sich die Waschlotion verflüchtigt, ist ein Abtrocknen nicht mehr notwendig. Trocknen Sie ggf. die Hautfalten durch Abtupfen mit einem Papiertuch. Werfen Sie nach dem Waschen den Waschhandschuh weg.
 - 12 Waschen Sie die Genitalien und das Gesäß mit Swash® Perineum Wipes / Waschhandschuhen oder mit Swash® Perineum+ Wipes gemäß dem Protokoll für Inkontinenzpflege.
 - 13 Kleiden Sie den Pflegebedürftigen wieder an und legen ihn/sie in die gewünschte Position.
 - 14 Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Waschhandschuhe im Abfalleimer. Achtung: Die Waschhandschuhe dürfen NIEMALS IN DER TOILETTE entsorgt werden!
 - 15 Notieren Sie eventuelle Anmerkungen.

ACHTUNG:

- Nehmen Sie zu jeder Zeit Rücksicht auf die Bedürfnisse und Schamgefühle des Pflegebedürftigen.
- Jede Packung darf nur für **eine** Person verwendet werden. Aufgrund der Infektionsgefahr wird davon abgeraten, geöffnete Packungen aufzuheben oder wiederzuverwenden.
- Es wird strengstens empfohlen, eine geöffnete Packung innerhalb von 48 Stunden aufzubauchen. Sollten in der Packung Waschhandschuhe übrig sein, notieren Sie bitte Datum und Uhrzeit auf der Packung und verwenden diese innerhalb von 48 Stunden für den gleichen Patienten, zum Beispiel zum Frischmachen am Abend.
- Befolgen Sie die richtige Vorgehensweise für das Waschen des Körpers. Verwenden Sie für jeden Körperteil einen neuen Waschhandschuh. Dadurch senken Sie das Risiko von Kreuzkontaminationen.
- Die Waschhandschuhe sind nur für die äußerliche Anwendung vorgesehen.
- Seien Sie vorsichtig beim Waschen der Augen.
- Wenn Sie die Swash® Bathing Gloves in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf der Packung erwärmen, müssen Sie die Temperatur der Waschhandschuhe prüfen, bevor Sie sie auf der Haut anwenden. Sind die Swash® Bathing Gloves heiß, dürfen sie nicht sofort verwendet werden. Denken Sie daran, dass das Tragen von Einweghandschuhen Ihr Hitzeempfinden verringert. Prüfen Sie die Temperatur insbesondere bei Kleinkindern oder Personen, die nicht reagieren können oder bei Personen, die eine empfindliche Haut haben.
- **Entsorgen Sie die Waschhandschuhe nicht in der Toilette. Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Waschhandschuhe im Abfalleimer.**

GEGENANZEIGEN:

- Wenn der Pflegebedürftige die Anwendung ablehnt
- Wenn bekannt ist, dass der Pflegebedürftige empfindlich oder allergisch auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagiert
- Auf nicht intakter Haut und offenen Wunden

PIKTOGRAMME AUF DER VERPACKUNG:

	Temperaturbegrenzung		UDI Nummer (Unique device identifier)
	Vor Lichteinstrahlung schützen		Innerhalb von 48 Std. aufbrauchen
	Vor Nässe schützen		In den Mülleimer werfen
	Nicht verwenden wenn Verpackung beschädigt ist. Gebrauchsanweisung beachten.		Nicht auflösend
	Nicht zur Wiederverwendung		Hinweis zum Erwärmen
	Nicht steril		Frei von Latex
	Medizinprodukt		In Clean Room produziert
	Konformitätszeichen		Das Produkt enthält keine Duftstoffe
	Chargennummer		Das Produkt enthält Duftstoffe
	Hersteller		Nicht in Toilette entsorgen
	Verwendbar bis		Gebrauchsanweisung oder elektr. Gebrauchsanweisung beachten

Die Informationen in diesen Anweisungen gelten insbesondere für die Verwendung der Swash® Bathing Gloves für das Waschen von bettlägerigen Pflegebedürftigen. Gemäß den Anweisungen und Richtlinien in Ihrer Pflegeeinrichtung kann diese Anweisung um weitere Maßnahmen und Schritte ergänzt werden.